

## KURZANLEITUNG: LILIAN Software Update V3

Sie finden in diesem Dokument eine Anleitung zur Update Ihres LILIANs. Auch wenn der Vorgang auf den ersten Blick etwas umfangreich wirkt, lassen sich die einzelnen Schritte einfach und schnell durchführen.

### **Für das Update sind im Wesentlichen zwei Schritte notwendig:**

1. Neu-Installation der LILIAN App und der LILIAN Manager App
2. Aktualisierung der Firmware auf dem LILIAN

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als Hilfe. Alternativ finden Sie auf unserem YouTube-Kanal Erklärvideos zur Installation der LILIAN App und der LILIAN Manager App auf Ihr Android-Smartphone. Scannen Sie einfach die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder klicken Sie auf die Internetlinks, um direkt auf das gewünschte Erklärvideo zu gelangen.



<https://youtu.be/zUrSs3F-lxU>

**App Download & V3 Firmwareupdate LILIAN**

Bitte beachten Sie dabei: Beide Apps funktionieren ausschließlich auf Android-Geräten ab Version 10. Apple Geräte werden zur Zeit leider noch nicht unterstützt.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an unter 0531 - 387 274 36 oder schreiben Sie an [support@lilianlabs.com](mailto:support@lilianlabs.com).

# Installation von LILIAN App und LILIAN Manager

1. Laden Sie sich die nötigen Installationsdateien Lilian-App-V3.**zip** und Lilian-Manager-App-V3.**zip** auf das Smartphone herunter, auf dem Sie die Apps installieren möchten. Sie finden diese unter <https://lilianlabs.com/downloads/>, erreichbar mit ihrem normalen Smartphone-Browser. Die Dateien werden nach dem Download in der Regel im Ordner „Downloads“ abgelegt.

Alternativ können Sie mit der Fotoapp Ihres Smartphones die folgenden QR-Codes scannen und der Download startet automatisch.

LILIAN APP V3



LILIAN Manager V3



LILIAN Firmware V3



2. Wählen Sie mit einem Dateibrowser (bei den mitgelieferten Gigaset Smartphones ist das die App „Files“) den Ordner „Downloads“ aus. Dort finden Sie die gespeicherten Installationsdateien. Klicken Sie diese Datei einmal an und wählen Sie „Extrahieren“ aus. Im gleichen Verzeichnis gibt es nun eine Datei V3\_20221011\_0700\_OfflineApp.**apk**, bzw. V3\_LilianManager-51.**apk**. Durch Anklicken dieser Dateien starten Sie jeweils die Installation.

Hinweis: Falls es bei der Installation der „LILIAN App“ zu einem Fehler kommt, muss diese zuerst deinstalliert werden. Drücken Sie dafür lange auf das Symbol auf Ihrem Android-Desktop und wählen Sie „App-Details“. Wenn Sie zu lange drücken, ändert sich das Menü und Sie schieben das App-Symbol oben rechts auf deinstallieren. Achtung: Einfaches „Entfernen“ (oben links) ist nicht ausreichend. Klicken Sie dann auf das Symbol mit dem Mülleimer „Deinstallieren“.

3. Nach der Installation finden Sie die Apps in der App-Übersicht des Smartphones (Auf den Desktop drücken und nach oben wischen). Suchen Sie dort LILIAN App V3 und LILIAN Manager App V3 und ziehen Sie die Symbole auf den Android-Desktop.

4. Dort können Sie die Apps durch Anklicken starten. Bitte bestätigen Sie alle beim ersten Start angefragten Zugriffsrechte, sonst funktionieren die Apps nicht ordnungsgemäß. Die Standortabfrage ist notwendig zur Funktionalität des Bluetooth. Es werden keine Ortsdaten durch Lilian Labs erhoben.

### **Hinweis:**

Das zur LILIAN Manager App zugehörige Dashboard benötigt keine Installation oder manuelle Updates. Sie erreichen es mit jedem handelsüblichen Browser (z.B. Chrome, Edge, Safari, Firefox,...) **unter der Internetadresse** <https://manager-v3.lilianlabs.com>. Nur die LILIAN App oder LILIAN Manager App müssen auf dem Smartphone vorhanden sein.

# Firmwareupdate

Folgend finden Sie eine Anleitung zur Aktualisierung der Software auf Ihrem LILIAN Messgerät (Firmware) mit 10 einfachen Schritten:

1. Unter <https://lilianlabs.com/downloads/> die neueste Firmwareversion „Lilian-Firmware-V3.zip“ am besten auf Ihr mitgeliefertes Smartphone herunterladen. Diese Datei entpacken, so dass Sie Zugriff auf “Lilian-Firmware-V3.bin” haben. Wie Sie z.B. eine Datei unter Windows entpacken: <https://tinyurl.com/yxkav4y6>
2. Netzteil des LILIAN in die Steckdose und danach den Stecker ans LILIAN stecken.
3. Das LILIAN vibriert kurz. Nach dem Vibrieren mit zwei Fingern den Sensor „berühren“ und die Finger auf dem Sensor liegen lassen.
4. Das LILIAN leuchtet jetzt 3x rot, anschließend orange. Wenn es orange leuchtet, können die Finger vom Sensor genommen werden.
5. Suchen und verbinden Sie Ihr Gerät nun mit dem WLAN „LILIAN“. Das WLAN-Passwort lautet: **WAS!lilian**  
Mit der Fotoapp Ihres Smartphone können Sie den folgenden QR-Code scannen, um das WLAN direkt anzulegen und auszuwählen.



WLAN Zugang zum LILIAN

6. Nun im Browser die Adresse 192.168.5.1 auswählen oder den folgenden QR-Code mit dem Mobiltelefon scannen:



Web Host LILIAN

7. Nun erscheint ein Fenster „LILIAN Firmwareupload“.

8. Wählen Sie „Datei auswählen“ und wählen Sie „Lilian-Firmware-V3.**bin**“. Meistens liegt diese nach dem Download (Punkt 1) im Ordner „Downloads“.

9. Wählen Sie „Hochladen...“.

10. Sobald der Prozess fertig ist, steht dort ok. Das LILIAN blinkt ein paar Mal grün und vibriert. Jetzt können Sie den Stecker wieder abziehen.

Das Update ist damit beendet.



HABEN SIE WEITERE FRAGEN ZUM  
SOFTWAREUPDATE 3?

☎ TEL. 0531 / 387 274 36

✉ SUPPORT@LILIANLABS.COM

Folgen Sie uns auf Social Media:

f @ t @ @LILIANLABS